


ALLEGATO 4 - CORRETTO UTILIZZO DEI DPI

MASCHERINE

COME UTILIZZARLE

1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica prima di indossare la mascherina;
2. Separare il lembo superiore da quello inferiore;
3. Tenere la mascherina con una mano con il lato aperto rivolto verso il viso. Con l'altra mano tirare gli elastici portandoli dietro la testa o le orecchie in base al modello.
Per le mascherine di tipo chirurgico fissare i lacci a metà testa e sulla nuca.
4. Assicurandosi che la mascherina copra bene naso e bocca;
5. Con entrambe le mani modellare la parte superiore assicurandosi che aderisca bene al naso;
6. Quando diventa umida, sostituirla con una nuova e non riutilizzata.

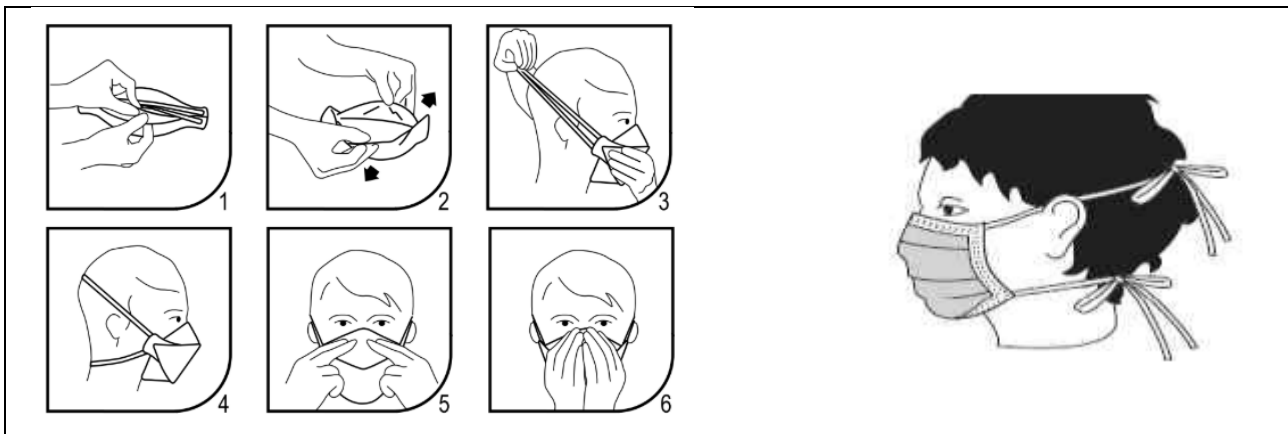

A fine utilizzo togliere la mascherina afferrando prima i lacci inferiori e poi quelli superiori, ripiegarla su sé stessa evitando di toccarla nella parte a contatto con bocca e naso (anche esterna). Dopo aver tolto la mascherina lavare accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica.

CONSERVAZIONE E DURATA

Conservare le maschere secondo le istruzioni del fabbricante, preferibilmente in sacchetto chiuso in modo che non rimanga esposta a polveri, liquidi, agenti contaminanti.


Sostituire la mascherina 1 volta al giorno.

RACCOMANDAZIONI L'utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Toccare la mascherina il meno possibile durante l'uso (possibilmente mai) evitando di toglierla per grattarsi naso, viso o bocca o rispondere al telefono.

GUANTI

COME UTILIZZARLI

- Indossare i guanti:
 1. Lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o strofinarle con una soluzione alcolica prima di indossare i guanti;
 2. Indossare i guanti fino a coprire i polsi;
- Togliere i guanti
 3. La parte esterna dei guanti è contaminata. Afferrare la parte esterna del guanto con la mano opposta guantata e rimuoverlo;
 4. Tenere il guanto rimosso nella mano guantata, successivamente infilare il dito della mano senza guanto sotto il polsino del guanto facendo attenzione a non venire a contatto con la superficie del palmo della mano guantata. Sfilare il guanto incorporando il primo guanto in un unico involucro.
 5. Eliminare i guanti contaminati in appositi contenitori.

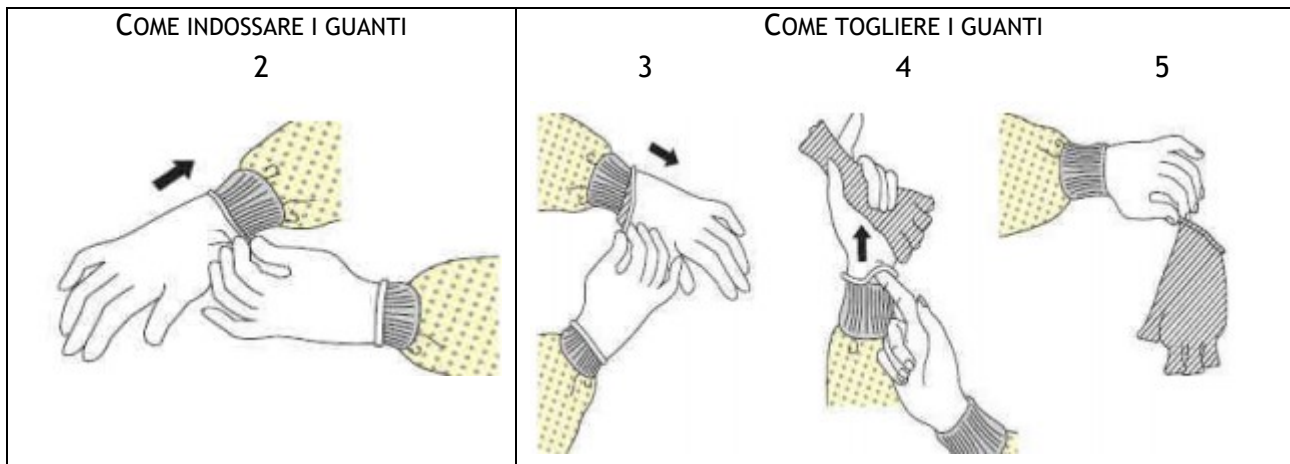

CONSERVAZIONE E DURATA

La durata dei guanti dipende dall'uso che ne viene fatto, in caso di necessità di sostituzione degli stessi rivolgersi al proprio responsabile.

RACCOMANDAZIONI

L'utilizzo deve essere accompagnato dallo scrupoloso rispetto delle norme igieniche quali lavaggio delle mani e distanziamento sociale. Non toccare con i guanti naso, occhi e bocca, strumenti di uso comune come cellulare, penne, occhiali, ecc.... Nel caso di contatto accidentale igienizzare questi oggetti.